


지혈용 멸균밴드

ADFLEX-SI[®]

INJECTION

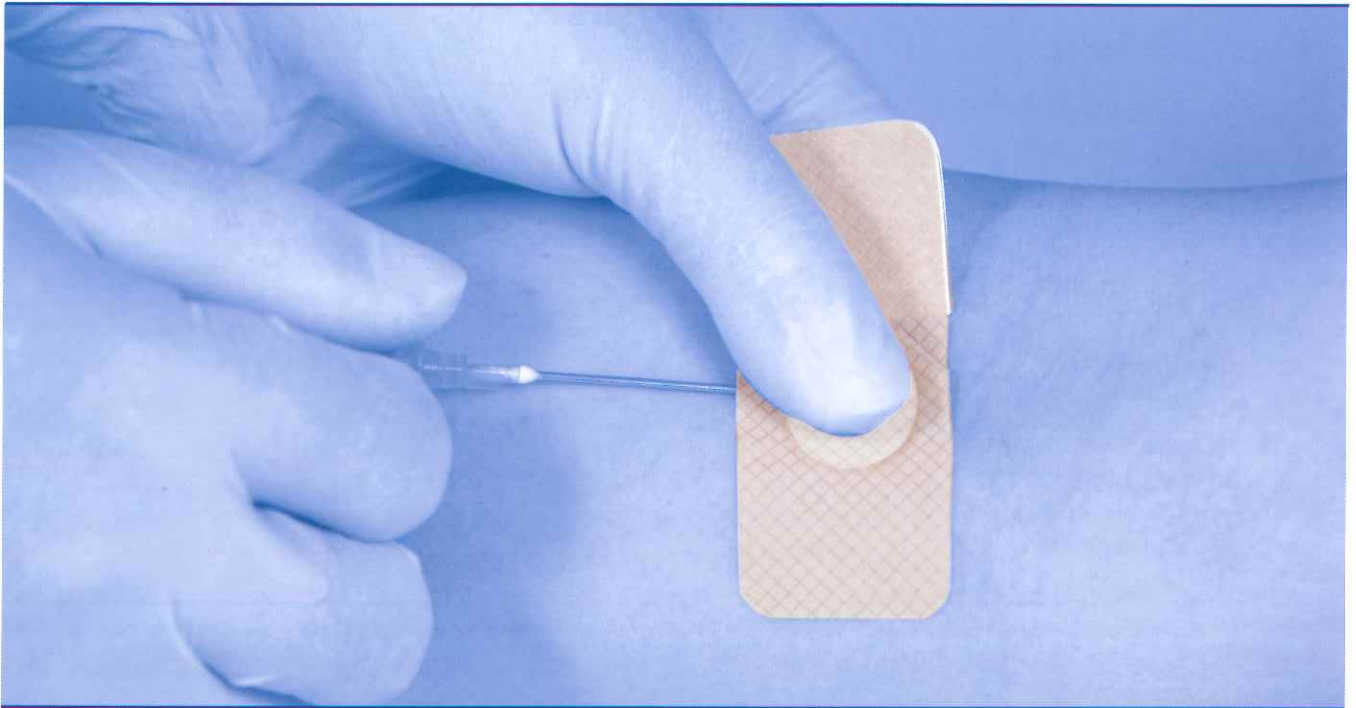


지혈용 멸균밴드

ADFLEX-SI[®]

INJECTION

포장단위

제품	규격	소포장	급여코드
	30 x 72mm	50개	K9206119
	45 x 100mm	30개	

제품의 용도

▶ 채혈, 카테타 및 정맥주사바늘 등의 주사침을 사용한 후에 발생하는 출혈을 방지해주는 압박용 지혈밴드

특징 및 장점

- ▶ 원형 패드에 의해 압박 지혈에 도움
- ▶ 신축성과 방수성을 지닌 우레탄 점착 밴드
- ▶ 피부 자극이 적은 점착제 사용
- ▶ 멸균된 제품으로 출혈 부위의 감염을 최소화 시킴
- ▶ 의료현장에서 환자와 의료 사용자에게 편리성 제공

사용방법



1 주사침을 제거하기 전에 지혈밴드를 올려 놓는다.



2 주사침을 제거한 후, 패드를 고정시킨다.



3 손가락을 누른 상태에서 지혈밴드의 한쪽 부분을 당겨서 피부 면에 붙인다.



4 3번과 같은 방법으로 반대편에도 지혈밴드를 붙인다.

주의사항

- ▶ 멸균포장지를 미리 개봉해 놓으면 멸균 효과가 없으므로, 사용직전에 바로 개봉하십시오.
- ▶ 피부에 부착 하신후 30분 내에 제거해주십시오.

판매원

Rapmedcare

랩메디케어(주)

경기도 성남시 중원구 상대원동 133-1

금강하이테크밸리 608, 609호

Tel : 031-777-5670 Fax : 031-777-5673

제조원

YC (주)영케미칼

YOUNG CHEMICAL CO.,LTD.

Agency