

CURE FIX



배액관과 동일한 실리콘(Silicone)재질의 의료기구용 클립




How It Works



1
제품을 준비합니다.



2
밴드 뒷면 보호테이프를 제거하고, 환부에 부착합니다.

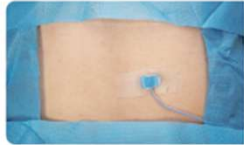

3
배액관을 고정지대 안으로 삽입하고, 실리콘 밴드를 당겨 반대편 홈에 넣어 고정합니다.



4
필요시, 보조 필름을 배액관에 위에 부착합니다.

CURE-FIX 의 장점

- 피부가 연약한 노인, 신생아, 어린이에게도 발진이나 피부 트러블 없이 안심하고 사용 가능
- 두가지 사이즈가 있고 사이즈에 맞게 사용 가능
- 배액관 고정용 클립
- 실리콘의 마찰력으로 배액관 이탈현상 방지
- 간단한 방식의 채결 구조로 쉽게 조작이 가능

제품명	CURE FIX
품목명 및 허가분류	1등급/의료기구용클립
사용목적	튜브 또는 카테터, 의료용저압지속흡인기(배액용기)의 배액관 등을 일시적으로 고정하거나 잡아주기 위해 사용하는 의료기구용 클립이다.
사용방법	고정 지지대의 관 삽입부를 충분히 버려 삽입부 안으로 튜브 또는 카테터 배액관을 삽입 한다. 피부 부착 테이프 이형지를 제거 부착 테이프가 비틀어지지 않도록 좌우로 늘리면서 시술하고자 하는 부위에 부착한다. 실리콘 밴드를 잡아 당겨 반대편 홈 부분에 밀착시켜 고정한다.
SIZE / 포장단위	(L)96 x (W)41 x (H)11 [3.2φ] / 1BOX-50EA (L)96 x (W)41 x (H)11 [4.8φ] / 1BOX-50EA
보험	급여: 상한가 3,340원
급여코드	M6700080