



제조외리자 : **그린메디팜 (주)**  
 경기도 파주시 탄현면 방촌로 955번길 62-38  
 T. 031-949-5626 F. 031-949-5627

사내 교육용

# GREEN BODY WARMER

Post-Operative thermoregulation  
disposable blanket




# GREEN BODY WARMER

Post-Operative thermoregulation disposable blanket

진공포장지를 개봉하면 패드 내 온열체가 산소와 반응하여 체온을 유지하는 비멸균 일회용 패드

## 01 G-SA1H(Half)

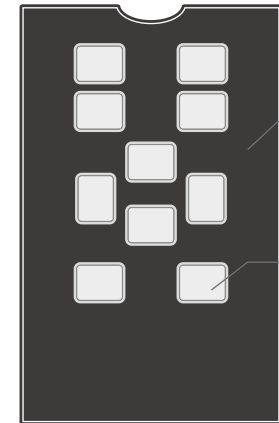


(1) 패드

(2) 온열체

- 1) 작동온도 : 43°C(+20°C, -10°C)
- 2) 작동온도 도달시간 : 30분 이하
- 3) 작동온도 유지시간 : 4시간 이상

## 02 G-SA1F(Full)

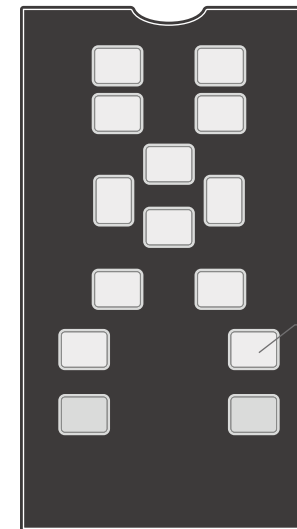

(1) 패드

(2) 온열체

### 1. 제품 라인업

(단위 : mm)

구분	가로	세로
G-SA1H(Half)	1,200	750
G-SA1F(Full)	1,500	850



**(1) 패드**  
환자의 체온 유지가 필요할 때 사용하는 패드로 환자에게 덮어서 사용



**(2) 온열체**  
포장지 개봉 후 공기와 접촉시 발열하는 온열체로 약 10시간 유지

### 3. 사용 방법

#### 1. 사용 전 준비사항 및 보관방법

- (1) 포장에 이상이 없는지 확인한다
- (2) 유효기간 및 사용 설명서를 숙지한 후, 사용 한다
- (3) 사용하지 않을 경우 직사광선을 피하여 실온 보관한다

#### 2. 사용방법

- (1) 외과용품의 포장지 및 유효기간 확인 후 제품을 개봉하여 꺼낸다
- (2) 필요한 시술 부위를 외과용품 위에 위치시킨다
- (3) 오염방지 활용 후 외과용품으로 체온유지를 위해 덮는다
- (4) 환자에 적용한 패드를 점검하고 확인한다

### 4. 주의 사항

- (1) 본 제품은 전문 의료인에 의해 사용되어야 하며, 사용 목적 이외의 사용을 금지한다
- (2) 본 제품은 일회용이므로 재사용하지 않는다
- (3) 유효기간 내에 있는 제품을 사용한다
- (4) 개봉 후 바로 사용하며 재사용은 금지한다
- (5) 제품 사용 시 부작용 및 가려움, 피부표백, 알러지 반응이 있거나, 접착부 위에서 열이 발생하거나 붉은색을 띠는 경우 즉시 의료진에게 알린다
- (6) 외과용품은 노출된 피부에 직접 닿지 않도록 한다
- (7) 외과용품은 바닥에 퍼서 사용하지 않는다

